

DESCRIPCIÓN

Marca: DVS.

Presentación: Tubo plástico para toma de muestra de sangre apto técnica de vacío, con tapón de seguridad.

Prueba: Hematología.

Material de ensayo: Acondicionamiento de muestras (plasma entero).

Aditivo: EDTA K3 10g%.

Código etiqueta: K3E.

Fabricante: DVS S.R.L.

Procedencia: República Argentina.

Registro sanitario: A.N.M.A.T. PM 1568-8.

Vencimiento: 12 meses.

Empaque: 1000 unidades // 20 racks por 50 unidades.

ESPECIFICACIONES

Los tubos con Edta K3 son identificados con etiqueta con el código en letra K3E y tapa lilas, de acuerdo a Normativa ISO 6710.

Las tapas son de grip plástico e interior de goma apto para ser perforado por agujas de muestreadores automáticos.

Los tubos son fabricados en plástico (COP).

Son de un solo uso (descartables).

La muestra debe homogeneizarse suavemente.

FORMA DE USO

Ajustar la aguja o adaptador en el holder.

Tomar el tubo e insertarlo firmemente en la aguja válvula que está dentro del holder, hasta que deje de ingresar sangre al mismo.

Homogeneizar suavemente.

RECOMENDACIONES

Siempre utilizar guantes al manipular tubos con muestras biológicas.

TUBOS CON EDTA K3

Tubos para extracción de vacío



REGISTROS APLICABLES AL PRODUCTO

ISO 9001:2008

ISO 13485:2003 Dispositivo médico

ANMAT, P.M. 1568-8

Directora técnica: Bioquímica

Ana D. Merli. M.N. 10470

