

■ DESCRIPCIÓN

Marca: DVS.

Descripción: Tubo plástico para toma de muestra de sangre (plasma) apto técnica de vacío, con tapón de seguridad.

Prueba: Química clínica.

Material de ensayo: Acondicionamiento de muestras para estudios, recuentos o ensayos.

Aditivo: Sc. Heparina Li y Gel.

Código etiqueta: LH.

Fabricante: DVS S.R.L.

Procedencia: República Argentina.

Registro sanitario: A.N.M.A.T. PM 1568-8.

Vencimiento: 12 meses.

Empaque: 1000 unidades // 20 racks por 50 unidades.

■ ESPECIFICACIONES

Los tubos con gel y Heparina Li son identificados con etiquetas y tapa verdes, de acuerdo a Normativa ISO 6710.

Las tapas son de grip plástico e interior de goma apto para ser perforado por agujas de muestreadores automáticos.

Los tubos son fabricados en plástico (COP).

Son de un solo uso (descartables).

Resistentes a la centrifugación.

Los tubos están recubiertos en su interior con Heparina Li pulverizada.

El gel está presente en el fondo del tubo. Luego del centrifugado, éste se posiciona en la interfase.

■ FORMA DE USO

Ajustar la aguja o adaptador en el holder.

Tomar el tubo e insertarlo firmemente en la aguja válvula que está dentro del holder, hasta que deje de ingresar sangre al mismo.

Homogeneizar suavemente.

Centrifugar durante 10 minutos a 1500 G.

El gel queda posicionado en la interfase.

■ RECOMENDACIONES

Siempre utilizar guantes al manipular tubos con muestras biológicas.

Verificar que la camisa portatubos de la centrifuga esté limpia, sin restos de partículas que puedan provocar la rotura del mismo.

Tener en cuenta que son G y no de R.P.M.

Para convertir RPM a G utilizar: $FCR = 1,118 \times 10^{-5} \times r \times (rpm)^2$

Siendo, según Todd-Stanford Davidsohn, "Diagnóstico y tratamiento clínico para el laboratorio".

FCR: fuerza centrifuga relativa en unidades G.

r: radio expresado en cm entre el eje de rotación y el centro del tubo de la centrifuga.

rpm: revoluciones por minuto.

TUBOS CON HEPARINA DE LITIO Y GEL

Tubos para extracción de vacío

